

INSTRUKCJA

użytkowania stacjonarnych
stołów do masażu



Linea V1 | V2 | V3



I. WSTĘP

Stoły stacjonarne AVENO LIFE Linea umożliwiają fizjoterapeutom prawidłowe, bezpieczne i efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu, mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/upośledzeń. Budowa stołów rehabilitacyjnych Linea pozwala fizjoterapeucie na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony.

II. INSTALACJA

1. Rozpakowanie

- Rozpakować stół.
- Sprawdzić, czy nie doznał uszkodzeń w czasie transportu. Jeśli byłby on uszkodzony, nie podłączać go i powiadomić sprzedawcę.

2. Podłączenie do sieci elektrycznej

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilania elektrycznego należy upewnić się, czy:

- Gniazdko ma odpowiednie uziemienie i czy odpowiada obowiązującym przepisom.
- Gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy urządzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych.
- napięcie prądu elektrycznego w sieci zgodne jest z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych
- Gniazdko odpowiada wtyczce. W przeciwnym razie należy wymienić gniazdko.



Nie należy instalować urządzeń na otwartym powietrzu. Siłowniki elektryczne mogą pracować nie dłużej niż 2 minuty. Ponowne uruchomienie jest możliwe po 18 minutach odpoczynku.

Po zainstalowaniu stołu gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne.

Nie używać przedłużaczy.

Kabel nie powinien być zginany.

Kabel zasilania elektrycznego może być wymieniony wyłącznie przez upoważnionego specjalistę.

Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw siłowników elektrycznych.

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, promieniowania UV, deszczu, nadmiernego zakurzenia, wilgoci.


Uwaga!

Producent uchyli się od wszelkiej odpowiedzialności, jeśli nie przestrzega się powyższych zasad.

III. OBSŁUGA


1. Regulacja wysokości stołów

Podnoszenie i opuszczanie stołów odbywa się za pomocą pilota nożnego lub ręcznego według poniższych opisów.

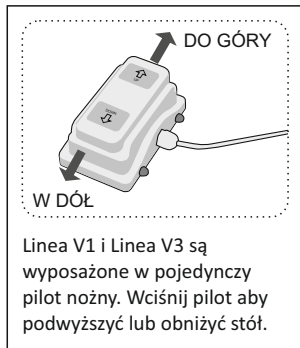


2. Regulacja oparcia stołów Linea V2 i Linea V3

Podnoszenie i opuszczanie oparcia odbywa się za pomocą pilota nożnego lub ręcznego według poniższych opisów.

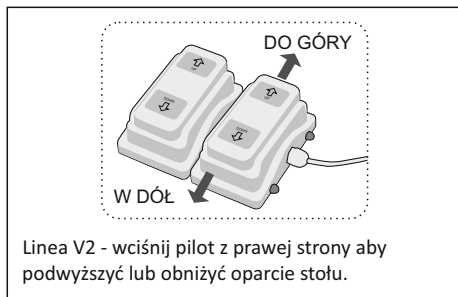


3. Regulacja podnóżka w stole Linea V3

Podnoszenie i opuszczanie podnóżka odbywa się za pomocą pilota ręcznego według poniższego opisu.

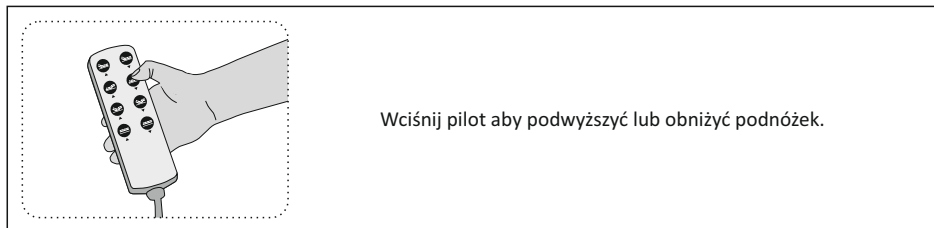


4. Zakładanie i zdejmowanie podłokietników (Linea V2, V3)

ZAKŁADANIE PODŁOKIETNIKÓW

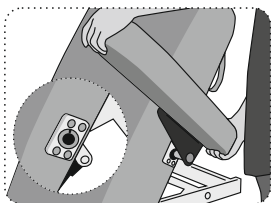

Trzymając podłokietnik pod kątem 30 stopni i wciśnij go, aż metalowy pręt całkiem wejdzie w otwór blatu stołu. Następnie obróć podłokietnik w dół, aż zostanie właściwie wypoziomowany.

ZDEJMOWANIE PODŁOKIETNIKÓW

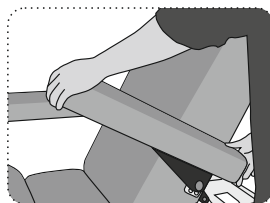


Unieś podłokietnik pod właściwym kątem i pociągnij do siebie.




Podczas montażu upewnij się, czy zakrzywiony bolec w metalowym pręcie podłokietnika został wyrównany z wycięciem w otworze blatu stołu.
Zabrania się siedzenia na podłokietnikach, obciążania ich dodatkową wagą.

5. Montaż podglówka

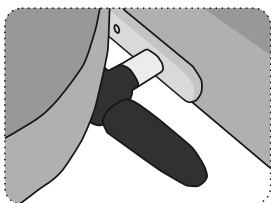


Włóż stelaż w otwory przy dźwigni w położeniu odblokowanym.

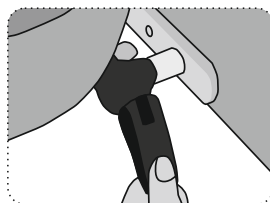


Ustaw stelaż podglówka w pożądanym poziomie i pociągnij dźwignię na dół żeby go zablokować.


6. Zakładanie półki pod ramiona

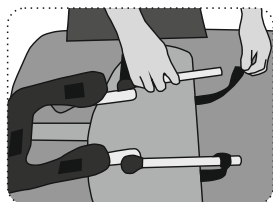

Umieść pętle taśm półki na końcu prętów stelaża podglówka.

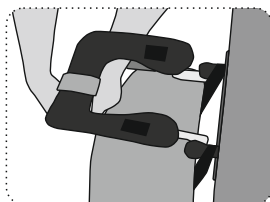


Zamontuj stelaż podglówka w blacie stołu i przyczep taśmę z rzepą do stelaża.

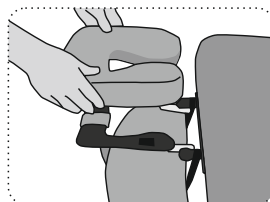

Umieść poduszkę podglówka na stelażu.

7. Przesuwanie stołów

Stoły Linea wyposażone są w dwie antypoślizgowe podkładki nóg oraz dwa kółka.

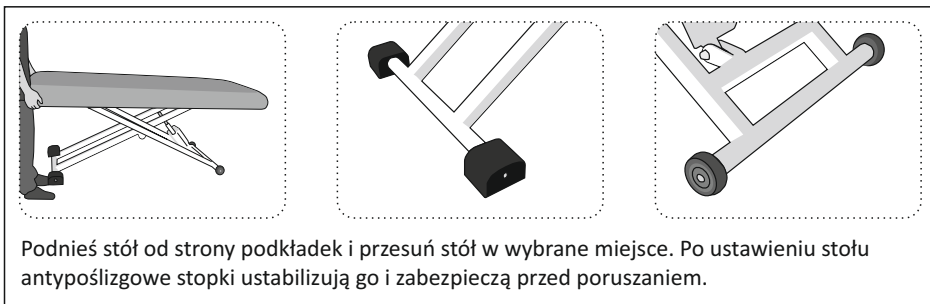

IV. ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
- Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem lub po otrzymaniu wskazówek od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Stołu powinny używać wyłącznie osoby dorosłe i w sposób zgodny z instrukcją.
- Stół przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- Nie dopuszcza się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
- Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
- Zabrania się siadania, klękania i opierania na podglówku, półkach i podłokietnikach.
- Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.
- Należy unikać długotrwałego kontaktu tapicerki stołu z olejkami. W tym celu należy stosować okrycie olejoodporne lub nieprzemakalne prześcieradła.
- Stół powinien być użytkowany i przechowywany z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
- Stołu nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie tapicerki stołu.
- Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel.
- Nie należy demontować urządzenia i próbować dostać się do jego wnętrza.


V. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Stal i elementy lakierowane: Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.


Dezynfekcja: Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

VI. SYSTEM ELEKTRYCZNY STOŁÓW


1. Części wchodzące w skład systemu elektrycznego.

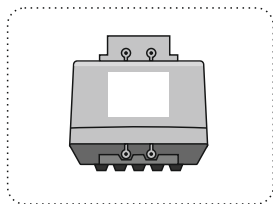


Skrzynka kontrolna

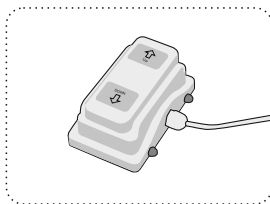


Pojedynczy pilot nożny (V1, V3)

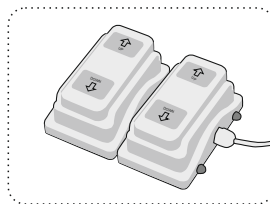


Podwójny pilot nożny (V2)

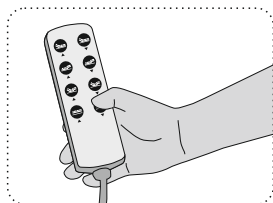


Pilot ręczny (Linea V3)

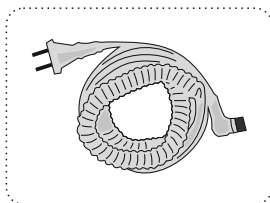


Kabel zasilania

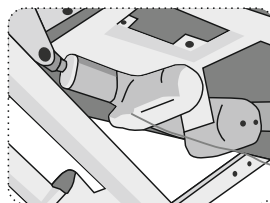

Siłownik podnóżnika

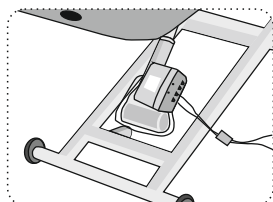

Siłownik zmiany wysokości

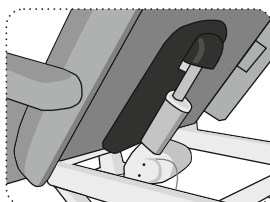


Siłownik oparcia (V2, V3)




Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza wraz z innymi odpadami gospodarczymi. Zużyty sprzęt należy oddać do właściwego punktu zbiórki. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.







2. Układ silnika.

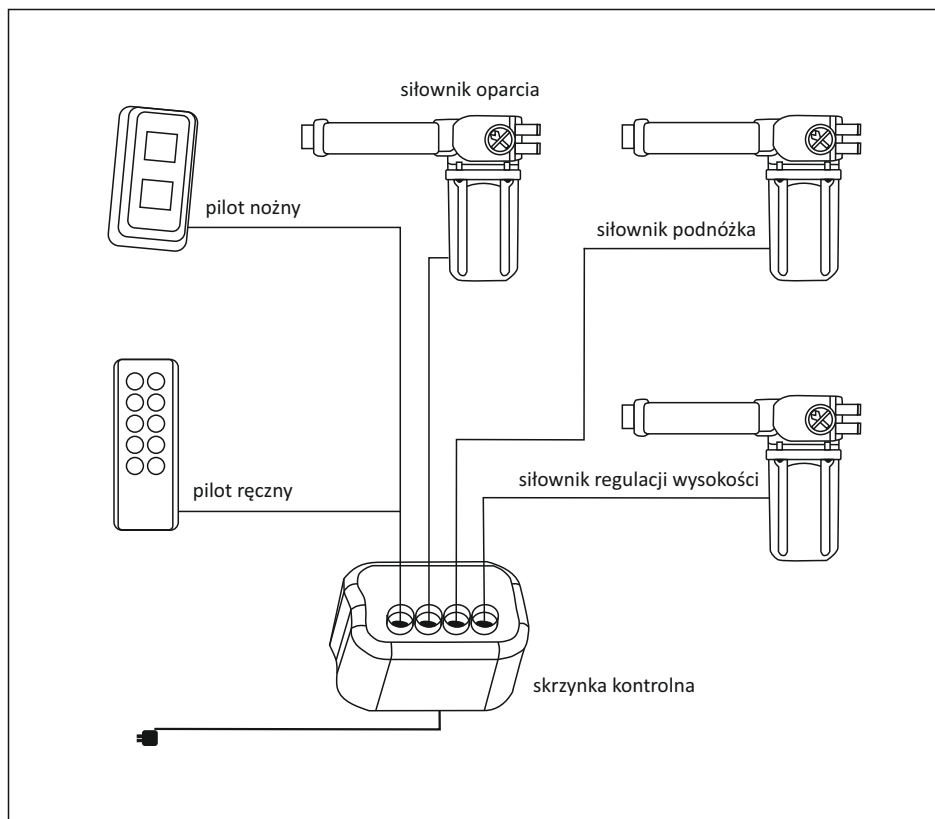

3. Pilot ręczny - sterowanie.

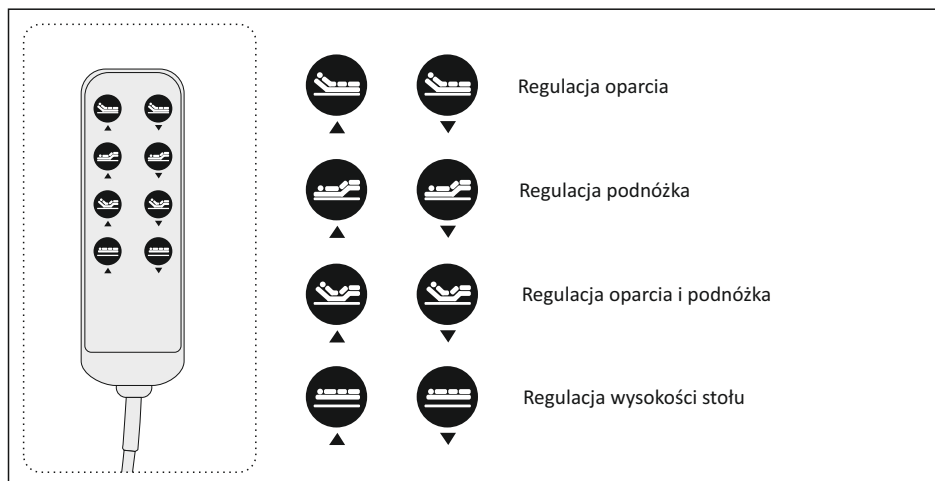

VII. WYMIARY I WAGA

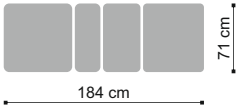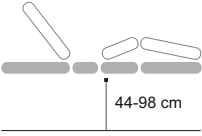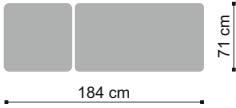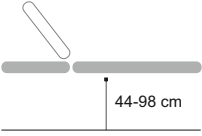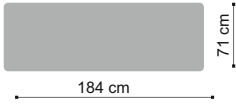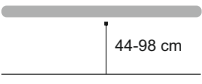	Wymiary	Możliwe położenia	Waga	Maksymalne obciążenie
Linea V3			60 kg	187 kg
Linea V2			60 kg	196 kg
Linea V1			52 kg	204 kg

Zasilanie elektryczne:
Napięcie 240VAC 50/60Hz, max. 3,15 A, IPX6.

