

## VII. Dane techniczne

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Szerokość (u podstawy)              | 48 cm        |
| Głębokość (u podstawy)              | 74 cm        |
| Wysokość regulowana (z podgłówkiem) | 114 - 134 cm |
| Wysokość od podłoża do siedziska    | 55 - 65 cm   |
| Waga bez wyposażenia                | 10 kg        |
| Dopuszczalne obciążenie             | 150 kg       |

# INSTRUKCJA

użytkowania krzesła  
do masażu





Travello



## I. Zastosowanie

Krzesła rehabilitacyjne są wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu chorób oraz urazów poprzez umożliwianie prowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych i masażu.


## II. Budowa krzeseł

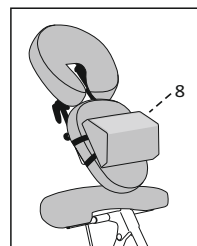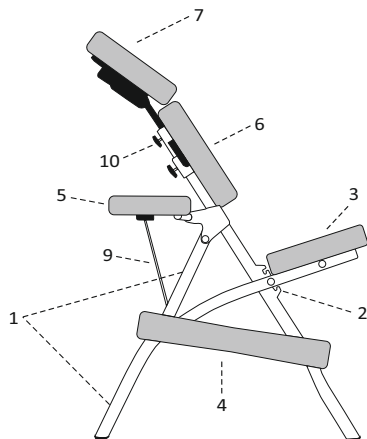

- |                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 1. Stelaż krzesła    | 6. Poduszka piersiowa                     |
| 2. Regulacja skokowa | 7. Podglówek regulowany                   |
| 3. Siedzisko         | 8. Kształtka pod klatkę piersiową         |
| 4. Podkolanniki      | 9. Regulacja położenia półki - prowadnica |
| 5. Półka pod ramiona | 10. Gałki regulujące wysokość podglówka   |

## III. Obsługa

### 1. Rozkładanie krzesła

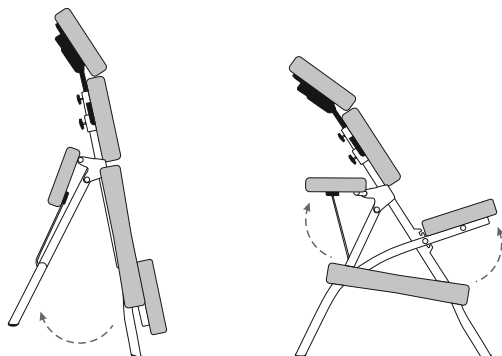

Rozsunąć stelaż (1), następnie podnieść siedzisko (3) oraz półkę pod ramiona (5).

### 2. Regulacja wysokości krzesła i kąta nachylenia siedziska

Wysokość i kąt nachylenia, regulujemy za pomocą mechanizmu regulacji skokowej (2).

### 3. Regulacja położenia półki pod ramiona (5)

Regulacja odbywa się za pomocą prowadnicy (9).

### 4. Regulacja położenia podglówka (7)

Podglówek regulowany (7) przymocowany jest do krzesła za pomocą dwóch gałek motylkowych. Aby przemieścić podglówek należy odkręcić obydwie gałki, wysunąć podglówek na żadaną wysokość, po czym powtórnie zakręcić gałki.

### 5. Kształtka pod klatkę piersiową (8)

Zalecana w masażu kobiet ciężarnych lub z dużym biustem. Montaż polega na zamocowaniu klina na poduszce piersiowej (8) za pomocą pasków mocujących.

## IV. Ułożenie pacjenta

Pacjent siada na siedzisko (3), kolana układa na podkolannikach (4), pochyla się do przodu, ręce opiera na półce pod ramiona (5) a twarz umieszcza w poduszce podglówka (7).

## V Czystczenie i dezynfekcja

Elementy chromowane i lakierowane:

Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty niezawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Przed zabiegiem należy sprawdzić prawidłowość rozstawienia stelaża. oraz stan techniczny.
2. Krzesło przeznaczone jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia krzesła wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania).
5. Nie należy regulować wysokości sprężyny gazowej przy pełnym obciążeniu.
6. Podczas korzystania z krzesła, stelaż półki pod ramiona (5) nie może opierać się o stelaż krzesła.
7. Krzesło użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
8. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.